


GAMME PRÉVENTION

AUTOTEST COLORECTAL

L'autotest colorectal est test rapide immunologique très spécifique qui permet de détecter la présence de sang dans les selles. L'autotest colorectal anticipe le risque de cancer du colon. Le cancer colorectal représente le 2ème cancer le plus notifié, pourtant lorsqu'il est pris en charge précocement il se guérit dans 9 cas sur 10.

- Interprétation claire
- Intimité dans la réalisation du test
- Résultat en 5 minutes
- Seuil de détection de l'hémoglobine: 50 ng/mL de fèces

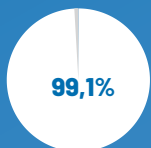

FIABILITÉ À 99,1%

*Fiabilité calculée sur 464 échantillons



AUTOTEST COLORECTAL

_Carte de procédure simplifiée

Contenu de la boîte :


- un sachet aluminium contenant une cassette test et un sachet desséchant
- un tube de prélèvement d'échantillons avec tampon d'extraction et son capuchon collecteur
- un papier pour le recueil des selles
- une notice d'utilisation

01




Relevez le siège des toilettes et faites bien coller les parties adhésives du papier de collecte sur le côté de la cuvette des toilettes. Émettre les selles sur le papier de collecte.

02

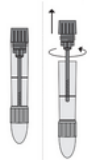


Dévissez le capuchon collecteur du tube de prélèvement d'échantillons.

03

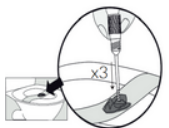

Plongez la tige en spirale dans les selles au moins à 3 endroits différents à 2 cm de profondeur. Remettez le capuchon collecteur dans le tube de prélèvement d'échantillons et revissez. Agitez-le vigoureusement.

04

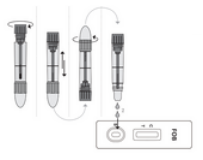


Tenez le tube de prélèvement d'échantillons à la verticale. Inversez le tube de prélèvement d'échantillons et enlevez le bouchon. Transférez 2 gouttes pleines de l'échantillon extrait dans le puits à échantillons (S) de la cassette test.

Lire les résultats après 5 minutes

Résultats


Invalide

C
T

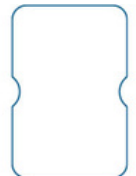


Invalide

C
T

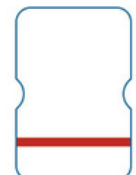

Négatif

C
T

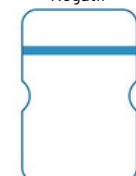

Positif

C
T

